

# NOTICE D'UTILISATION

## APPAREIL DE LUMINOTHÉRAPIE À LUMIÈRE ROUGE

### POUR CHATS ET CHIENS

#### INTRODUCTION

Veillez lire attentivement le manuel et notamment les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel.

#### PRÉCAUTIONS POUR LES RISQUES ÉLECTRIQUES

Lorsque l'appareil est en service, il est interdit de l'utiliser proche d'une autre source de chaleur. Veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans le dispositif. N'utilisez pas l'appareil si la fiche d'alimentation est endommagée. Ne laissez pas l'appareil branché pendant une longue période. Si le produit ou la fiche sont endommagés, le produit doit être vérifié et réparé par un réparateur agréé. Veuillez contacter le vendeur pour la réparation si le produit est encore sous garantie.

#### ENTRETIEN ET NETTOYAGE :

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, contactez le service après-vente. Veuillez ne pas démonter ou réparer l'appareil vous-même sans autorisation.

- Après l'avoir éteint, essuyez toujours l'appareil avec un chiffon en coton humide pour préserver l'hygiène. N'utilisez pas de produits chimiques ou de benzène.
- Utilisez du coton imbibé d'alcool pour nettoyer délicatement les ports d'émission de lumière ou les LED.
- N'immergez pas l'appareil dans un liquide quelconque et ne le nettoyez pas avec des instruments durs.
- Veuillez tenir l'appareil à l'écart de l'humidité et des températures élevées, et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil, car cela réduirait sa durée de vie.
- Ne placez pas d'objets durs ou pointus sur ou près de l'appareil, ce qui pourrait endommager sa surface ou la tête de traitement laser.
- Après utilisation, veuillez remettre l'unité principale et tous les accessoires dans la boîte de rangement pour éviter de les perdre et d'affecter la prochaine utilisation.

#### TRANSPORT ET STOCKAGE :

Les moyens de transport généraux sont autorisés, mais il faut éviter les chocs violents, les vibrations, l'eau pendant le transport. L'appareil emballé doit être stocké dans une pièce avec une humidité relative inférieure à 80%, sans gaz corrosif et avec une bonne ventilation.

#### RÈGLES DE RÉCLAMATION

La garantie ne s'applique pas :

- Si ce qui précède n'est pas respecté.
- S'il y a eu une intervention non autorisée sur l'appareil.
- Si l'appareil a été malmené, soumis à un traitement brutal ou à toute autre forme de dommage. Si des défauts sont apparus en raison de défaillances du système d'alimentation.

## **À PROPOS**

La luminothérapie est utilisée pour stimuler les cellules et favoriser la circulation sanguine. La lumière de faible intensité est dirigée vers la blessure, la lésion ou la zone douloureuse pour ouvrir les vaisseaux sanguins. Une fois les vaisseaux sanguins dilatés, le sang afflue vers la zone affectée et favorise la production de nouveaux globules rouges, ce qui déclenche la guérison. Parallèlement à cette régénération cellulaire, des endorphines, qui sont les antidouleurs naturels du corps, sont également libérées. La lumière émise produit une sensation de chaleur et réduit la sensibilité de la zone, ce qui soulage également la douleur. Elle diminue l'inflammation, réduit l'enflure et la douleur, et accélère la récupération.

## **POURQUOI UTILISER LA THÉRAPIE PAR LUMIÈRE ROUGE ET PROCHE INFRAROUGE ?**

La thérapie par lumière rouge et proche infrarouge est une approche thérapeutique innovante qui exploite les propriétés uniques de ces longueurs d'onde pour stimuler la guérison et le bien-être cellulaire. La lumière rouge, avec sa capacité à pénétrer plus profondément dans les tissus, est particulièrement efficace pour traiter les affections cutanées, les douleurs localisées, les inflammations légères et accélérer la cicatrisation des plaies superficielles. Son mécanisme d'action repose sur la stimulation des mitochondries, les centrales énergétiques des cellules, augmentant ainsi la production d'ATP et l'activité cellulaire globale. Cependant, les effets de cette thérapie ne sont pas instantanés et nécessitent du temps pour se manifester pleinement, en raison du cycle de renouvellement des globules rouges qui dure environ 120 à 140 jours. Pour obtenir des résultats significatifs, il est donc essentiel de maintenir une utilisation régulière et prolongée de l'appareil de thérapie par lumière rouge, généralement sur plusieurs semaines ou mois, afin de permettre l'accumulation progressive des effets bénéfiques au niveau cellulaire et la stimulation complète du système circulatoire.

La lumière rouge n'a aucun effet secondaire. Elle ne génère pas de chaleur, bien que vous puissiez ressentir une sensation de chaleur légère et agréable.

## **LES BÉNÉFICES DE CET APPAREIL DE LUMINOTHÉRAPIE**

Ce type de thérapie aide à traiter divers problèmes de santé chez les animaux de compagnie comme par exemple :

- Gingivite
- Problèmes de disques vertébraux
- Anomalies musculo-squelettiques
- Blessures aiguës
- Infections de l'oreille
- Blessures aux tendons, muscles et ligaments
- Gains musculaires
- Traumatismes des tissus mous
- Douleur post-chirurgicale
- Arthrite
- Infections des glandes anales
- Plaies ouvertes
- Points chauds (infections parasitaires, allergies, lésions cutanées...)
- Dysplasie de la hanche
- Maladie dégénérative du disque

## À PROPOS DE CET APPAREIL

Les études cliniques montrent que la douleur est stressante pour les animaux de compagnie. Ils n'ont pas besoin d'un traitement qui pourrait augmenter encore plus leur stress. Avec la luminothérapie, vos animaux reçoivent un traitement relaxant à impulsions lumineuses qui soulage en même temps leurs problèmes de santé. La salle de traitement à prévoir pour la thérapie est généralement une pièce spacieuse et confortable, avec de la lumière naturelle. Là, vous pouvez positionner votre animal sur un tapis pour favoriser la relaxation. Une séance de luminothérapie dure entre 10 et 30 minutes. Pendant le traitement, le cerveau de votre animal libère des endorphines qui le font se sentir mieux. Avant même que la séance suivante ne commence, votre animal associe déjà les personnes, le lieu et l'équipement à quelque chose d'agréable.

Cet appareil de luminothérapie utilise les longueurs d'onde les plus efficaces de la lumière rouge visible (660 nm) et de la lumière proche infrarouge (850 nm) (invisible) pour aider la peau et le corps de l'animal à se rétablir. Aucune préparation spéciale n'est nécessaire pour utiliser cet appareil et aucun soin particulier n'est requis après le traitement.

Notre appareil lumineux pour animaux de compagnie peut être utilisé pour atténuer les symptômes de la dysplasie de la hanche, les douleurs dorsales, l'arthrite, les douleurs au genou et plus encore, ainsi que d'autres causes de douleurs profondes articulaires ou musculaires, réduire l'inflammation et promouvoir la santé générale. En utilisant ce dispositif, vous améliorerez l'état de la peau de votre animal sur les plaies post-chirurgicales, les infections topiques, la dermatite, l'eczéma, les points chauds et plus encore. Votre animal connaîtra également une croissance des poils.

## DESCRIPTIF DE L'APPAREIL



## **DURÉE ET FRÉQUENCE DES TRAITEMENTS**

Utiliser les lunettes de protection fournies lors des traitements.

La durée recommandée des traitements est d'un minimum de 10 minutes et d'un maximum de 30 minutes. Le nombre de traitements quotidiens est d'un minimum de 2. Dans les cas plus graves, plusieurs traitements peuvent être effectués successivement (jusqu'à 10 traitements), dans ce cas, il est recommandé de faire une pause d'au moins 15 minutes entre les traitements.

Il est fortement conseillé de consulter votre vétérinaire afin de déterminer le protocole de traitement le plus approprié pour votre animal de compagnie. Votre vétérinaire pourra vous indiquer la fréquence et la durée optimales des séances en fonction de l'état de santé spécifique de votre animal.

## **ÉLIMINATION DU PRODUIT**

Le produit usagé ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Conformément à la législation, le produit doit être éliminé de manière appropriée afin que les matériaux puissent être recyclés dans le respect de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez consulter les autorités locales compétentes ou l'entreprise d'élimination locale. Le produit est équipé du logo suivant :

