

NOTICE D'UTILISATION

CEINTURE DE LUMINOTHÉRAPIE À LUMIÈRE ROUGE

POUR CHATS ET CHIENS

INTRODUCTION

Veillez lire attentivement le manuel et notamment les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel.

PRÉCAUTIONS POUR LES RISQUES ÉLECTRIQUES

Lorsque l'appareil est en service, il est interdit de l'utiliser proche d'une autre source de chaleur. N'utilisez pas l'appareil si la fiche d'alimentation est endommagée. Ne laissez pas l'appareil branché pendant une longue période. Si le produit ou la fiche sont endommagés, le produit doit être vérifié et réparé par un réparateur agréé. Veuillez contacter le vendeur pour la réparation si le produit est encore sous garantie.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVANT ET PENDANT L'UTILISATION :

Même si cette technologie n'a pas d'effets secondaires, nous vous suggérons de prendre les précautions suivantes :

- Cet appareil est résistant à l'eau mais pas étanche ! Ne plongez pas le bandage ou ses composants dans l'eau.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé par les enfants et les femmes enceintes.
- Votre séance ne doit pas dépasser 30 minutes sur une même zone de traitement.
- Ne regardez pas directement la lumière.
- Pour les instructions de nettoyage, essuyez légèrement le bandage avec un tissu humide ou une serviette sèche.
- En cas de dysfonctionnement de l'appareil, contactez le service après-vente. Veuillez ne pas démonter ou réparer l'appareil vous-même sans autorisation.

RÈGLES DE RÉCLAMATION

La garantie ne s'applique pas :

- Si ce qui précède n'est pas respecté.
- S'il y a eu une intervention non autorisée sur l'appareil.
- Si l'appareil a été malmené, soumis à un traitement brutal ou à toute autre forme de dommage. Si des défauts sont apparus en raison de défaillances du système d'alimentation.

À PROPOS

Cette ceinture de luminothérapie offre une approche thérapeutique combinée particulièrement efficace. Elle utilise 222 diodes LED, dont 74 émettant une lumière rouge à 660 nm et 148 une lumière proche infrarouge à 850 nm. Cette combinaison de longueurs d'onde permet d'agir à différents niveaux :

La lumière rouge à 660 nm :

La lumière rouge visible, avec des longueurs d'onde de 630 à 700 nm, pénètre les tissus jusqu'à une profondeur d'environ 10 mm. La lumière à cette longueur d'onde est très bénéfique pour traiter les problèmes proches de la surface de la peau, tels que les plaies, coupures, cicatrices, points gâchettes et points d'acupuncture, et est particulièrement efficace pour traiter les infections.

La lumière proche infrarouge à 850 nm

La lumière proche infrarouge (800 à 1000 nm) pénètre à une profondeur d'environ 50 mm et plus, ce qui la rend plus efficace pour traiter les structures musculaires profondes, les tendons, les ligaments, les articulations, les os et les organes.

DES AVANTAGES RECONNUS PAR LA SCIENCE

Des recherches montrent que les longueurs d'onde du spectre situées entre 630 et 1000 nm offrent une réponse biologique optimale. Elle démontrent également que la thérapie par lumière rouge présente des avantages significatifs pour les animaux de compagnie, tant dans leur réhabilitation après une blessure que dans l'amélioration de leurs performances, et cela sans effets secondaires indésirables.

Voici quelques exemples d'utilisation de ce dispositif à lumière rouge :

- Blessures musculaires et tendineuses
- Amélioration de la circulation sanguine
- Traitement de l'inflammation des articulations
- Accélération de la guérison des plaies
- Soulagement de la douleur
- Traitement de la bursite et de l'arthrite
- Traitement des affections cutanées
- Récupération post-opératoire
- Amélioration de l'état du pelage
- Traitement des infections et problème microbiens

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



CONSEILS D'UTILISATION

1. **FACILE A UTILISER** : Il suffit d'appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer l'appareil.
L'animal peut se déplacer lors de la séance de luminothérapie.
Veuillez noter que le port est de Type-C avec batterie intégrée.

2. SÉLECTION DES MODES

Mode 1 : mode en continu

Appuyez une fois rapidement sur le bouton d'alimentation ON/OFF pour qu'il s'allume en vert et que toutes les LED s'allument. Ensuite :

- a) Si vous appuyez une deuxième fois sur le bouton ON/OFF, seules les LED rouges resteront allumées (les LED proche infrarouge s'éteindront).
- b) Si vous appuyez une troisième fois sur ce même bouton, seules les LED proche infrarouge s'allumeront (les LED rouges s'éteindront). Veuillez noter que la lumière infrarouge est invisible à l'œil nu, il peut donc vous sembler que les LED sont éteintes alors qu'elles sont en réalité allumées.
- c) Si vous appuyez une quatrième fois sur le bouton ON/OFF, toutes les LED s'éteindront.

Lorsque vous remarquez que la luminosité diminue, il est temps de recharger l'appareil avec le câble fourni.

Mode 2 : mode pulsé (pour optimiser la pénétration et traiter les tissus profonds).

Si vous maintenez le bouton d'alimentation ON/OFF enfoncé **pendant plus de 3 secondes**, le bouton d'alimentation s'allume en bleu. Ensuite :

- a) Si vous appuyez une fois sur le bouton ON/OFF, toutes les LED passeront en mode pulsé.
- b) Si vous appuyez une seconde fois sur ce même bouton, seules les LED rouge passeront en mode pulsé.
- c) Si vous appuyez une troisième fois, seules les LED proche infrarouge passeront en mode pulsé.
- d) Si vous appuyez une quatrième fois, toutes les LED s'éteindront.

3. FRÉQUENCE D'UTILISATION

Il est conseillé d'utiliser l'appareil 1 à 2 fois par jour pendant au moins 1 semaine, et pour une durée comprise entre 15 et 30 minutes maximum.

Vous pouvez laisser votre animal marcher pendant qu'il utilise la ceinture de luminothérapie.

La durée peut varier, en fonction des différents problèmes de santé et de leur gravité.

Il est fortement conseillé de consulter votre vétérinaire afin de déterminer le protocole de traitement le plus approprié pour votre animal de compagnie. Votre vétérinaire pourra vous indiquer la fréquence et la durée optimales des séances en fonction de l'état de santé spécifique de votre animal.

4. **RANGEMENT DU DISPOSITIF** : Débranchez l'appareil et rangez-le dans un endroit frais et sec.

5. ENTRETIEN : Pour nettoyer votre appareil, nous recommandons d'utiliser une serviette humide ou une brosse à dents. Assurez-vous que l'appareil est débranché, déconnecté et éteint. Nettoyez uniquement la partie en tissu de l'appareil et non les diodes LED directement.
Ne l'utilisez pas si vous êtes dans un environnement humide. Laissez l'appareil sécher à l'air et assurez-vous de le garder à l'abri de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance : 37 W

Port : Type-C

2 Modes : Pulsé et en continu

Quantité de LED : 74 LED x 0,5 W

Quantité de puces : Chaque LED comprend 3 puces (74 lumières rouges et 148 lumières proche infrarouge)

Batterie : 1800 mAh *2

Longueurs d'onde : 660 nm et 850 nm

Irradiance : 150 mW/cm²

ÉLIMINATION DU PRODUIT

Le produit usagé ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Conformément à la législation, le produit doit être éliminé de manière appropriée afin que les matériaux puissent être recyclés dans le respect de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez consulter les autorités locales compétentes ou l'entreprise d'élimination locale. Le produit est équipé du logo suivant :

